

自動消毒液噴霧器 ウィルツシュ VIRUSH

1回の噴霧量
約0.14ml

噴霧回数が
1回~3回まで
設定可能

最大連続使用回数は
約2,142回

電池寿命
1日10回噴霧使用で
約6ヶ月

※ご使用の際は、電池によって駆動が弱ります。

□卓上型



【仕様】
 商品名 自動消毒液噴霧器 ウィルツシュ(卓上型)
 型番 AIM-ADD1
 本体サイズ 直径:約9cm 高さ:約23cm
 本体重量 約0.5kg(電池・消毒液除く)
 電源 DC4.5V(単3乾電池3本)
 タンク容量 約300ml(タンク目盛MAX時)
 消費電力 約0.1W
 本体材質 ABS樹脂
 原産国 中国製
 付属品 ネジ3本 らうと 取付カバー 消毒液ノズル
 ボトル 単3乾電池3本(動作確認用)

※ご購入OK

標準価格: 5,980円(税込)

□スタンド型



【仕様】
 商品名 自動消毒液噴霧器 ウィルツシュ(スタンド型)
 型番 AIM-AD10
 本体サイズ 直径:約30.0cm 高さ:約99.6cm
 本体重量 約2.9kg(電池・消毒液除く)
 電源 DC4.5V(単3乾電池3本)
 タンク容量 約300ml(タンク目盛MAX時)
 消費電力 約0.1W
 本体材質 ABS樹脂
 原産国 中国製
 付属品 ネジ3本 支柱 土台 らうと 消毒液ノズル
 ボトル 単3乾電池3本(動作確認用)

標準価格: 15,000円(税込)

□専用消毒液



シンワ「消毒用アルコール」
 価格: 2,600円(税込) 交換期間の目安: 消毒液がなくなるとき
 消耗品販売のご案内
 本製品の消耗品(消毒液)の交換をご希望の場合は、当社にて取り
 扱っておりますので、下記の当社ホームページまたは以下のお客
 様相談窓口までお問い合わせください。

お客様相談窓口

この製品のお問い合わせは販売店もしくは下記をお願いします。

ツカモトエム株式会社
 ナビダイヤル
 (全国共通)

0570-081-634

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
 【受付時間(平日を除く)】10:00~17:30
 都合によりお休みの日がございます

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

販売元: ツカモトエム株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5
 TEL: 03-3278-1511・1512 FAX: 03-3279-1515

- ⓐ 警告**
- ① 分解・修理・改造をしない
分解・修理・改造を行うのは、修理が正しいか、修理が完了したか、お取り扱い説明書に正確に記載されています。
 - ② 火気厳禁
アルコール系液体は引火性液体に属し、火気の周囲には近づけてください。火気の周囲には近づけてください。
 - ③ 乾電池が液漏れしたときは、必ず取り除く
乾電池が液漏れしたときは、必ず取り除く。乾電池が液漏れしたときは、必ず取り除く。乾電池が液漏れしたときは、必ず取り除く。
 - ④ 液体が目に飛びかかると、目を傷める恐れがあります。
液体が目に飛びかかると、目を傷める恐れがあります。液体が目に飛びかかると、目を傷める恐れがあります。
 - ⑤ 噴霧器、タンク、取付カバー、消毒液ノズル、本体、電池の各部に傷や汚れがひどい場合は、各部の交換をおこなってください。
噴霧器、タンク、取付カバー、消毒液ノズル、本体、電池の各部に傷や汚れがひどい場合は、各部の交換をおこなってください。
 - ⑥ 取付説明書に必ずお読みください。
取付説明書に必ずお読みください。取付説明書に必ずお読みください。
 - ⑦ 充電・使用時は必ず充電器を接続してください。
充電・使用時は必ず充電器を接続してください。充電・使用時は必ず充電器を接続してください。
 - ⑧ 故障や異常があるときは使用しない
充電・使用時は必ず充電器を接続してください。充電・使用時は必ず充電器を接続してください。
 - ⑨ センサー感知区域に手以外を差し込まない
センサ感知区域に手以外を差し込まない。センサ感知区域に手以外を差し込まない。
 - ⑩ 電源を切らないでください。
電源を切らないでください。電源を切らないでください。
- ⓑ 注意**
- ① 消毒後の濡れた手は火気厳禁
消毒後の濡れた手は火気厳禁。消毒後の濡れた手は火気厳禁。
 - ② 移動、運搬時の注意
本体を移動、運搬する際には、消毒液を完全に拭き取ってから、もしくはボトルを取り外してから運ぶてください。
 - ③ 水かけ禁止
本体に水をかけないでください。感電や故障の原因になります。
 - ④ 消毒液がこぼれたらふき取る
消毒液がこぼれたら、すぐにふき取ってください。消毒液がこぼれたら、すぐにふき取ってください。
 - ⑤ お手入れの際は、必ず電源を切る
本体に水をかけないでください。感電や故障の原因になります。
- ⓑ 消毒液についての注意**
- ① 指定のみを使用する
「消毒用アルコール」を使用してください。指定の消毒液以外の消毒液は使用しないでください。指定の消毒液以外の消毒液は使用しないでください。
 - ② 消毒効果について
本製品は、指定の消毒液を使用するときにのみ消毒効果が期待できます。指定の消毒液以外の消毒液は使用しないでください。指定の消毒液以外の消毒液は使用しないでください。

自動消毒液噴霧器

ウィルツシュ
VIRUSH



ツカモトエム「ホームページ」のご案内
<http://www.tsukamoto-aim.co.jp/>

ホームページでは新製品情報や、商品に関するさまざまな情報をお届けしてあります。また、お客様の商品購入やお問い合わせにもご対応いただける便利なホームページです。ぜひ、一度ご覧ください。

お問い合わせは

☎ 0186-49-3951
 FAX 0186-49-3815

東北環境消毒有限公司
 〒017-0043

秋田県大館市有浦 4 丁目 5-30

人が集まる場所での感染症対策。
ニーズは高まっているのに、有効に利用されていないことも。
本当に使いたくなくなる手指消毒液の設置でイメージUP!

MARKET DATA & NEWS

インフルエンザや感染症・食中毒対策に
ますます高まる手指消毒液のニーズ。

感染症の危険にさらされている日常


たとえば年々感染者が増えるインフルエンザ(グラフ)の主な感染ルートは3つ。①患者の粘液が直接入る経路②患者の咳やくしゃみから飛沫を吸い込む経路。1回のくしゃみにより約40,000個の飛沫が発生するとの接触により③ウイルスが付着したものの接触による。手を通じ口から侵入する経路。ウイルスは紙幣、ドアの取っ手、電灯のスイッチにも短時間であれば、存在できるといわれています。

USER'S VOICE

その一方で、一般消費者からは
現在の手指消毒方法に疑問や不満が出ています。

「人が触れたポンプには
触れたくない」という人も。
また、設置しっぱなしのポンプ式には、「ポンプの頭に菌がついている気がする」「人が触れるから不潔では」と、利用を避けようという人も出てきています。

手荒れが
心配

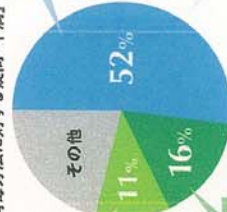

ポンプに汚れた手で触れるのが問題

CUSTOMER'S VOICE


6 手指消毒剤はやっぱり
使われないと意味がない

以前はポンプ式の手指消毒剤を置いていましたが、あまり使われていないようなので、今は特に置いていません。多くの患者さんも触れるの、逆に敬遠されたのかもしれないですね。こういうものはみんなが使っていてこそ意味のあるもの。使われるようなものがあるれば、と思います。

6 今では病院も信頼や技術はもちろん
居心地や雰囲気でも差別化する時代

ドクターの顔はもちろんですが、今、クリニックも競争の時代、インターネットやイメージで差別化することが大切なんです。消毒剤も、デザインや使い勝手がよいものだと、クリニックで、患者さんへの気遣いが出てきているイメージにもつながると思います。

「インフルエンザの2007-2010年の週別発生状況」

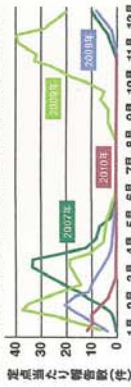

(国立感染症研究所のデータから)

注目される手洗いの励行

たとえば満員電車の中で空気感染にはマスクが効果的ですが、ウイルスの付着したつり革に触れた手が何かの拍子で口に触れたりすると感染してしまいます。また、うがいにはウイルスが付着した時点で行わなくては効果が低いとされています。そこで手洗いの励行が高く注目されているのです。

風邪やインフルエンザ対策とは、感染を引き起こす目に見えないウイルスとの闘い。これにはマスクやうがいをしても外出を抑えることで、ある程度感染を抑えることはできますが、「手洗い」が何より効果的です。外出から戻ったら「手洗い」という生活習慣をぜひ定着させましょう。 新潟文化短期大学学長・医学博士 中原英臣


『ウイルスシユ』は自動噴霧式で
直接触れないから衛生的、シンプルでクリンなデザインで
病院やクリニック、医療機関・施設に最適です。

CLEAN FUNCTION

ノータッチの噴霧式だから衛生的
誰もが気持ちよく利用いただけます。

手に馴染みやすい
霧状の消毒液が
適量噴霧

消毒液は手にムラなく
吹きつけられるので、
手の消毒が気軽にで
きます。

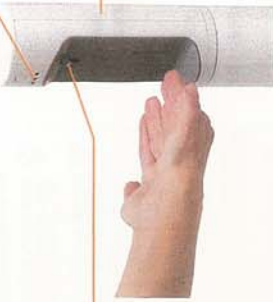

消毒液はタンク式
電池電源で設置もケアも簡単

消毒液はタンクに充填するだけでなので効率的。
設置場所を選ばない電池による電源です。



※壁取付イメージ



使
い
方

RECOMMEND POINT

お子様や高齢者にも安心してお使いいただけ、
来院者、患者様の積極的な感染症対策を促します。

SIMPLE DESIGN

清潔なイメージを重視する病院やクリニックの
エントランスや受付にふさわしいシンプルなデザイン。

卓上型

機能性はもちろんデザインも
クリンなイメージのウイルスシユは、受付のカウンターに置
いてもぴったり。

スタンド型

案内や告知物などモノが多い
受付や、待合室が狭い場合で
も、壁ベーススタンド型なら
すっきり設置できます。



受付時にシユと消毒、気軽に使える卓上型。

見てもスタイリッシュで、壁ベーススタンド型。